

長期安定性に優れた 無添加

NEW 弱酸性次亜塩素酸 (HClO) 除菌水

特許
取得

フィリオ30[®]

サーティー

幅広い細菌やウイルスを素早く除去

タンパク素早く除去

あらゆる材質に優しく安全

菌やウイルスを素早く除去▶分解後は水になっていきます。(※水は拭き取りください。)

フィリオ30(サーティー)は

ユニット周り



印象模型の除菌



ハンドピース表面清拭



空間除菌



歯科医院を含む約6,000件以上の衛生管理を強化する施設で信頼の実績

＜現場の声＞


- フィリオ30はアルコールでは効果が無いとされる『強い細菌やウイルス』も素早く除去出来る！
- アルコールでは『タンパク』を固める作用があるが、フィリオ30は『タンパク』除去の効果もある優れもの！
- 塩素系漂白剤に比べ、フィリオ30は『漂白作用も大幅に軽減され』あらゆる素材にも優しく『手肌にも優しく』使い勝手が良い。
- 訪問診療先で、器具・ブラシ・白衣にも使用でき、感染予防と器具のメンテナンスが速やかにできて便利。
- 水道水で希釈して使えるから『経済的』

**神奈川県立
産業総合研究所
3年連続
成果事例採用**

フィリオ30(サーティー)の
除菌効果の試験先(主要)
＜財団法人 北里環境化学センター＞

北里環境科学センターは、
北里大学の衛生学部環境衛生研究センターを
母体に昭和52年4月に設立した検査機関です。

汚染血液によるフィリオ30除タンパク効果試験

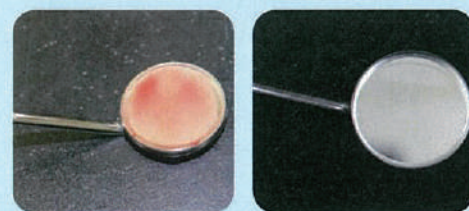

販売元

株式会社スカイレインボー

TEL. 045-444-8214

E-mail: skyrainbow3729@yahoo.co.jp

販売店

株式会社miracle

TEL: 03-6421-2195 / FAX: 03-6421-2861

E-mail: miracle@chuo4618.com



ファイロ30(サーティ)除菌マニュアル

ユニット周り



※5倍希釈(30秒)
噴霧後、ふき取る

タービン・HPの表面




※5倍希釈(30秒)
噴霧後、ふき取る

印象物の除菌



※原液(10秒)
噴霧後、流水

器具(浸漬除菌又は超音波洗浄)

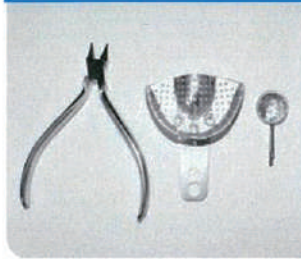

※20倍希釈(10分)
浸漬後、よく乾燥

空間除菌



超音波加湿器
20倍希釈
(加熱式は不可)

希釈率・放置時間・コスト(製品20Lの場合)

原液	10秒	130円(100mlあたり)
5倍	30秒	27円(100mlあたり)
10倍	5分	14円(100mlあたり)
20倍	10分	7円(100mlあたり)

ファイロ30 1Lセット 定価 3,800円(税別)



計量CUP
×1個



シャワーポンプ
×1本



1,000cc業務用
×1本



専用スプレー容器
×1本

※空容器のデザインは、予告なく変更する場合があります。

400ccスプレー 500ppm/弱酸性



定価 2,400円(税別)

1L 500ppm/弱酸性



定価 3,850円(税別)

5L 500ppm/弱酸性



定価 12,400円(税別)

20L 500ppm/弱酸性



定価 26,500円(税別)

※合計が1万円(税別)以上で送料無料となります。

専用空容器

シャワーポンプタイプ1L
オープン価格